


DEFI-Standorte in Flammersbach

SGV Hütte am Gebäude zum Parkplatz/Sportplatz hin **außen/24h**

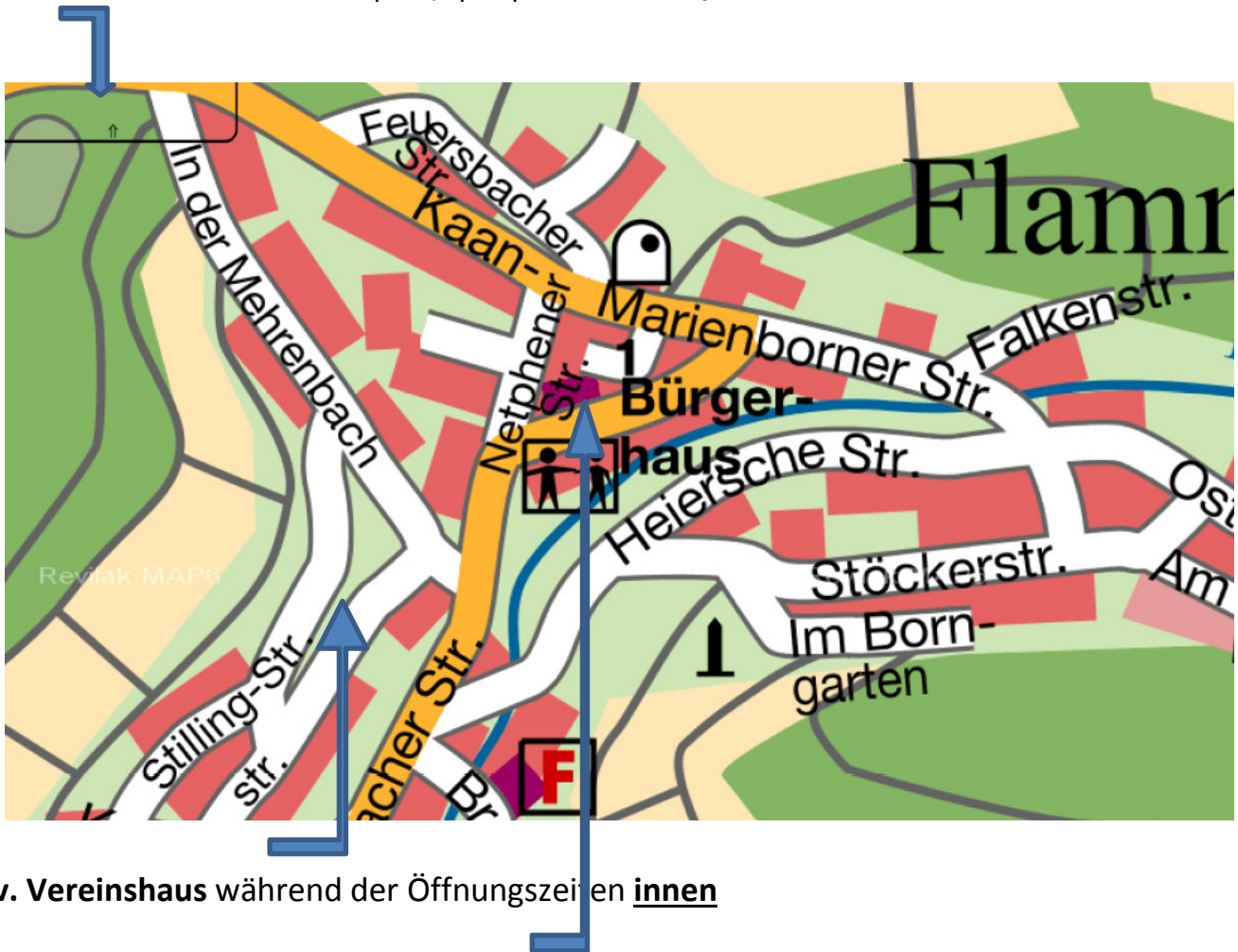

Ev. Vereinshaus während der Öffnungszeiten **innen**

Parkplatz **Bürgerhaus außen/24h**

Die DEFI's **außen** an der SGV-Hütte und dem Bürgerhaus stehen rund um die Uhr (24h) zur Verfügung.

Die DEFI's können ohne jeden Zeitverzug aus dem Outdoorschrank entnommen werden.

Beim Herausnehmen des DEFI aus dem Outdoorschrank wird **kein** Notruf abgesetzt.

Infos zum DEFI-Schutzbrief mit DEFI-Kataster sind unter www.definetz.eu erhältlich

Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren:

Angliederungsgenossenschaft Flammersbach

(mit den beteiligten Ortsvereinen)


Sparkasse Siegen

Stiftung Rödgen

Adventsfenster Flammersbach 2017+2018

Kurzbeschreibung Anwendung DEFI/AED

RETTUNGSLEITLINIE GEMÄSS ERC

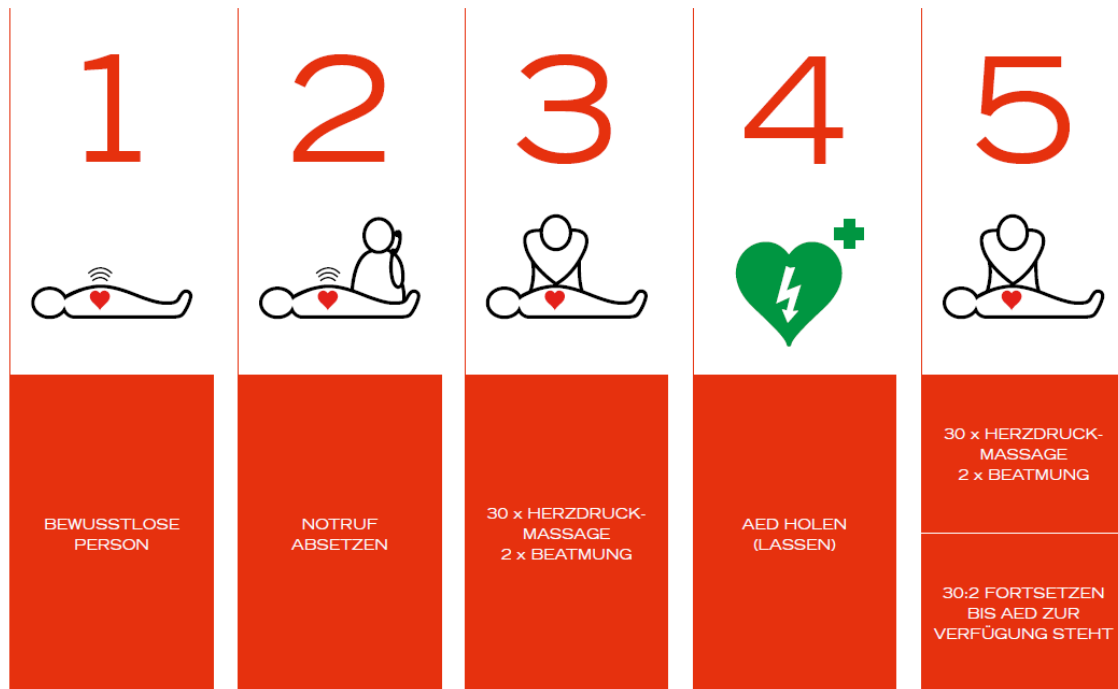

Heart Save AED



- (1) Lautsprecher
- (2) Kindertaste
- (3) Schockabgabe nach Analyse
- (4) Anschlussbuchse Elektroden
- (5) Statusanzeige Batterie...
- (6) Batteriefach
- (7) Sprachtaste

Der Heartsave besonders einfach und unkompliziert gestaltet. So ist das Gerät nach Abnehmen der Schutzklappe sofort einsatzbereit. Um den Defibrillator benutzen zu können, ist keinerlei Fachwissen erforderlich. Damit Sie im Ernstfall fachgerecht handeln können, werden Sie über eine ruhige Sprachführung angewiesen, was zu tun ist.

Kurze, prägnante Ansagen führen Sie durch die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Zusätzlich werden Sie durch ein Metronom unterstützt, welches Ihnen die Frequenz für die Herzmassage vorgibt. Damit im Ernstfall nicht erst unnötig Zeit für den Elektrodenwechsel (von Erwachsenen zu Kinderelektroden) verwendet werden muss, lässt sich einfach und schnell über einen Knopf in den Kinder- oder Erwachsenenmodus wechseln. Nachdem Sie die Elektroden an den Patienten gebracht haben, wird der AED ca. 7 bis 12 Sekunden lang das EKG bestimmen, um über eine eventuelle Schockabgabe zu entscheiden. Wenn Sie die halbautomatische Variante wählen, müssen Sie zur Schockabgabe nur noch den großen Schockknopf drücken.